

ULTRADENT

DENTAL UNITS. MADE IN GERMANY.



KOMPAKTKLASSE: VIELSEITIG, SPORTLICH, FLEXIBEL

Damit können Sie viele starke Runden drehen.



U 1302

INHALT

ULTRADENT präsentiert die Kompaktklasse	3
U 1302	4/5
U 1301 L/R	6/7
Extras der Kompaktklasse	8 - 11
U 1280	12/13
U 3000	14/15
vision U Kompakt	16
Grund- und Zusatzausstattung	17

DER ULTRADENT VIERER FÜR INDIVIDUALISTEN. IM DAUEREINSATZ IN IHRER PRAXIS.



U 1301 LINKS/RECHTS



U 1280



U 3000

Sehr verehrte Zahnärztin,
sehr geehrter Zahnarzt,

qualifizierte Teams, wie man sie beispielsweise im Radsport findet, haben mit der ULTRADENT Kompaktklasse mehr gemeinsam, als ein erster Blick vermuten ließe. Hier wie dort wird der Mannschaftserfolg vom Einsatz aller getragen. Schaut man genauer hin, kann man profilierte Einzelpersönlichkeiten mit hoher Spezialisierung und individuellen Stärken entdecken.

Damit Sie und Ihre Praxis in den Genuss der souveränen Leistung unserer Kompaktklasse kommen, brauchen Sie die vier Individualisten dieser Produktkategorie nicht als Vierer-Team zu beschäftigen. Es genügt, wenn Sie für Ihren Bedarf den optimalen Behandlungsplatz auswählen. Welcher unserer Vier nahtlos passt, stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor.

Freuen Sie sich schon jetzt auf generelle Vorteile: Die Kompaktklasse von ULTRADENT bietet Ihnen hochwertige Platzkonzepte für jeden Anspruch. Alle vier Modelle basieren auf der identischen Stuhlkonzeption, der übereinstimmenden Funktionalität und lassen sich einheitlich bedienen. Dabei kommt ihre hohe Qualität unserer Premiumklasse extrem nahe, so dass Sie von einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis profitieren.

Bahn frei für die ULTRADENT Kompaktklasse! Mehr Power für hocheffizientes dentales Behandeln.

MIT NUR EINER HAND ALLES IN PERFEKTER REICHWEITE HABEN? U 1302 SEINE FUNKTIONALITÄT MACHT IHN ZUM KOMPETENTEN TEAMPLAYER

Es ist kein Zufall, dass wir Ihre Aufmerksamkeit zuerst auf den U 1302 lenken. Denn der Standard der ULTRADENT Kompaktklasse wird von dieser übersichtlichen, effizient strukturierten Behandlungseinheit definiert. Die Themen Qualität, Material und Verarbeitung interpretiert er auf vorbildliche Art und Weise, was ihn fast auf ein Niveau mit unserer Premiumeinheit U 1600 hebt. Höchste Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit sind ebenso inklusive wie mühelose Funktionalität für einfaches, sicheres und vielseitiges Bedienen. Alle Instrumente und der Traytisch mit großer Ablagefläche sind mit einer Hand erreichbar und stufenlos positionierbar. Zusätzlich kann der U 1302 in viele Richtungen ausgebaut werden, z. B. multimedial mit Full-HD-Monitor und digitaler Intraoralkamera. So ist er offen für Ihren Bedarf und kommt Ihnen mit einem herausragenden Verhältnis von Leistung und Preis entgegen.




Den **U 1302** präsentieren wir Ihnen hier in Standardlackierung Reinweiß RAL 9010 mit der Polsterfarbe Rot 1414T sowie Akzentlackierung an Helferinnenelement, Arztelement und Abdeckung der Wassereinheit in Polsterfarbe.



MIT DEM U 1302 KÖNNEN SIE IN KONZENTRIERTER RUHE IHRE RUNDEN DREHEN

Der durchdachte Aufbau des U 1302 sorgt dafür, dass Sie in aller Ruhe konzentriert arbeiten können. Die Säule mit Behandlungsleuchte, Traytisch und Arztelement ist auf einer eigenen, schweren Bodenplatte montiert: Vibrationen übertragen sich nicht. Zum luftigen, eleganten und offenen Design gehört eine durchgängige, UV-beständige Lackierung, so dass optische Harmonie in Ihrem Ambiente Einzug hält.

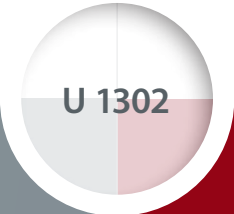

1

1 | Traytisch und Zahnarztelement

Wie bei der Premiueinheit U 1600 sind diese beiden Elemente auch beim U 1302 für ideale Reichweite positioniert. Wir montieren sie in fester Verbindung an einem stabilen Schwenkarm. Ein schneller Griff – und Sie erreichen alles einhändig. Effizienter und bequemer geht es nicht!



2

2 | Wassereinheit und Assistenzelement

Vollendeter Bedienkomfort ist die Devise, wenn es um die Arbeit Ihres Teams geht: Einstellungen am Assistenzelement lassen sich auf dem übersichtlichen Display mühelos ablesen. Seine Montage auf einem Mehrgelenksarm sorgt für präzise Positionierung. Die formschöne Wassereinheit sitzt auf idealer Höhe und ermöglicht Ihren Patienten ein müheloses Ausspülen.

VON RECHTS ARBEITEN? VON LINKS ARBEITEN? AN EINER EINHEIT? **U 1301 LINKS/RECHTS** DER FAVORIT FÜR ZAHNÄRZTE, DIE BEIM BEHANDELN DIE SEITEN WECHSELN WOLLEN

Wenn neben Rechtshändern auch Linkshänder zu Ihrem zahnärztlichen Team gehören – oder falls Ihnen das Arbeiten mit der linken Hand grundsätzlich lieber ist: Für beide Anforderungen können wir Ihnen mit dem U 1301 L/R unseren wandlungsfähigen Behandlungsplatz empfehlen. Natürlich ist auch der U 1301 L/R mit intelligenter Technik in höchster Qualität ausgestattet – zu einem unwiderstehlichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses spezielle Modell lässt sich auf Wunsch von Ihrem Praxisteam einfach und mühelos umbauen: mit wenigen, komfortablen Handgriffen, ohne Werkzeug, in weniger als 30 Sekunden. Damit gibt Ihnen unser U 1301 L/R die völlig freie Wahl, ob und wann in Ihrer Zahnarztpraxis mit Links oder mit Rechts behandelt werden soll.





Den flexiblen **U 1301 L/R** im Bild haben wir in Standardlackierung Reinweiß RAL 9010 ausgeführt und mit Polstern in Zinkgelb 1300T ausgestattet.



DIE SEITE WÄHLEN – NOCH SCHNELLER UMSTELLEN

An sich ist der unkomplizierte Umbau des U 1301 L/R an Einfachheit und Schnelligkeit nicht zu übertreffen. Doch wenn die Sache in Ihrer Dentalpraxis partout noch flinker und reibungsloser laufen soll, können Sie das Zahnarzt-element als fahrbares Cart optional bestellen. Damit wechseln Sie noch schneller die Seite bei noch besserer Ergonomie.

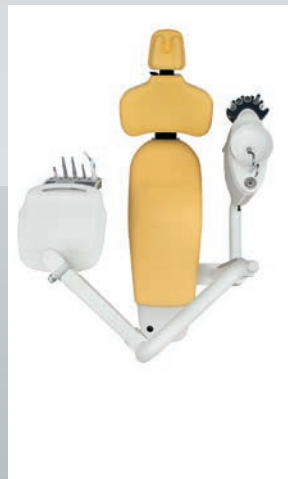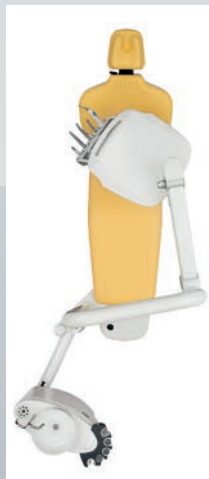

U 1301 L/R

Position für Linkshänder Den Clou in der wandlungsfähigen Konstruktion des U 1301 L/R bildet der zentrale Schwenkarm. Er kann mit einem gezielten Griff entriegelt und zur gegenüberliegenden Seite gedreht werden. Ist die Arbeitsposition für Linkshänder gewählt, sieht Ihr Behandlungsplatz so aus wie auf dem linken Bild dargestellt.

Position für Rechtshänder OP-Leuchte, Wassereinheit, Helferinnenelement und das am stabilen Seitenarm montierte Zahnarzt-element machen den Seitenwechsel flexibel mit. Nach der Umstellung muss Ihr Personal die einzelnen Elemente nur feinjustieren. Im rechten Bild ist unser U 1301 L/R fertig vorbereitet für das Behandeln durch Rechtshänder.

INSTRUMENTENAUSWAHL

In der Kompaktklasse von ULTRADENT können Sie Ihren Favoriten unter vier hochwertigen Behandlungsplätzen bestimmen. Dabei macht es unser einzigartiges Konfigurationskonzept möglich, die zahnmedizinischen Instrumente nach Ihren persönlichen Ansprüchen zu integrieren. Einige Beispiele stellen wir Ihnen vor:

1 | Elektrochirurgiegerät im Arztelement integriert und somit schnell zu greifen.

2 | 3-Wegespritze in neuer, hygienisch glatter Designversion; für optimierte Ergonomie, intuitiv bedienbar, mit konsequenter Trennung von Luft und Wasser.

3 | Ultraschall-Zahnsteinentferner mit LED-Beleuchtung und drei Betriebsmodi: Scaling, Endo und PA-Behandlung.

4 | Mini-LED-Polymerisationsleuchte zum Aushärten von Kunststoffen mit neuester LED-Technologie, dank elektrischem Festanschluss immer einsatzbereit.

5 | KL 7 S Lichtmikromotor in topmoderner und wartungsfreier Ausführung, kurz und leicht, mit einem hohen Drehmoment und einem Drehzahlpektrum von 100 - 40.000 U/min. (Hersteller: SycoTec)



EXTRAS DER KOMPAKTKLASSE

FUSSANLASSER

Der stabile und exakt ansprechende Fußschalter ist der technische Schlüssel, um Ihre Behandlungseinheit aus der ULTRADENT Kompaktklasse zuverlässig und mühelos zu bedienen. Alle Funktionen sind übersichtlich angeordnet. Mit dem hochstehenden Bügel können Sie ihn einfach in Stellung bringen. Er gibt Ihnen die Möglichkeit, die Stuhlposition neben der Instrumentensteuerung auch komplett per Fußanlasser zu steuern. Auf Wunsch können wir dieses Gerät mit Funksteuerung an Sie liefern, damit störende Kabel vollständig vermieden werden.



SOLARIS 2


Wie die ULTRADENT Kompaktklasse im Allgemeinen, so wird Ihnen die Behandlungsleuchte „Solaris 2“ völlig neue Lichtblicke bringen. Sie entspricht dem neuesten dentalen Lichtstandard auf Basis verschleißfreier LED-Technologie mit hoher Lebensdauer und bietet Ihnen die Regelung der Lichtintensität in einem Bereich von 2.500 bis 45.000 Lux bei kontinuierlicher Farbintensität von 5.000 °K. Ihr CRI-Wert von 95 ist das bisher für LED mögliche Maximum: ideal, um Zahnfarben auf einem völlig neuen Niveau zu bestimmen. Einfachste Bedienung, extrem niedriger Stromverbrauch, geringste Wärmeentwicklung, geräuschloser Betrieb: Was wollen Sie mehr?



OMPAKTKLASSE

POLSTER

Wie komfortabel und stabil Ihr Patient liegt, das entscheidet über den Erfolg Ihrer Behandlung mit. Aus diesem Grund lassen die vier Modelle der ULTRADENT Kompaktklasse keine Wünsche offen. Wir liefern Ihnen jede Einheit auf Wunsch mit einer kompletten Softpolsterung, die sich an die Körperform des Patienten anschmiegt. Optional können Sie Ihren Behandlungsstuhl auch mit Echtlederpolsterung, mit oder ohne Belüftung bzw. mit oder ohne Armstützen bekommen. Und damit der Kopf stets gut und sicher gelagert ist, haben wir verschiedene magnetische Kopfpolster, die auf den flexiblen Kopfstützen die Lagerung perfektionieren.

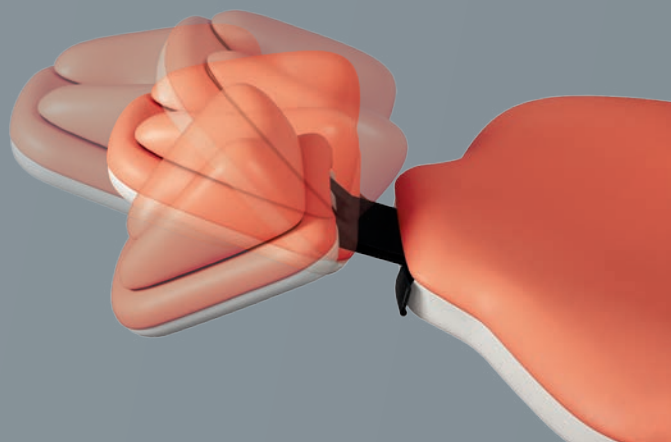




ASSISTENZELEMENT „KOMPAKT“

Als nützliche Ergänzung können Sie das Assistenzelement „Kompakt“ zu allen vier Modellen optional bestellen. Die Steuerung des Patientenstuhls und alle anderen wichtigen Funktionen sind auf dem Bedienfeld angeordnet. So kann Ihre Helferin diese Arbeit perfekt übernehmen. Auf Wunsch sind die beiden Saugschläuche selektiv gesteuert und werden während des Absaugens mit Wasser gespült, damit in puncto Hygiene alles sicher ist.

DISPLAY AUF DEM ARZTELEMENT

Da es uns am Herzen liegt, Ihnen eine einheitliche Bedienbarkeit der Kompaktklasse anzubieten, geben wir dem U 1302, U 1301 L/R, U 1280 und U 3000 ein einheitliches Bediendisplay auf dem Zahnarztelement. Auf dieser Basis haben Sie die Sicherheit, dass die Funktionalität der einzelnen Einheiten im Rahmen der gewohnten Handgriffe bleibt. Sie profitieren von Arbeitsabläufen, die verinnerlicht sind – und das auch, wenn Sie sich für die Steuerung Ihrer Einheit über den Fußschalter entscheiden.

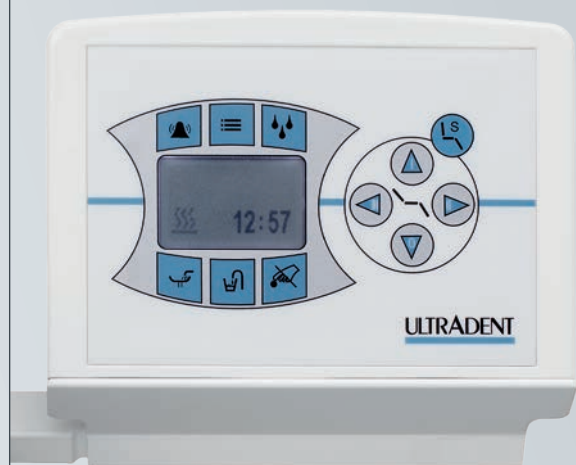

EXTRAS DER KOMPAKTKLASSE

LACKIERUNG

Typisch ULTRADENT ist die enorme Freiheit, mit der Sie Ihre Phantasie beim Zusammenstellen von Lackfarbe und Polsterfarbe spielen lassen können. Da machen die Einheiten der Kompaktklasse keine Ausnahme. Denken Sie ruhig einmal nicht im großen Ganzen, sondern im Detail. Denn wie Sie auf dem Bild erkennen, können wir Ihnen auch die Akzentlackierung einzelner Elemente

passend zur Polsterfarbe anbieten (sehen Sie hierzu auch S. 12).

Wie Lack und Polster visuell zusammenwirken, testen Sie am besten gleich persönlich mit unserem Farbkonfigurator auf www.ultradent.de. Er macht so gut wie alles möglich und lässt Ihre Augen strahlen.





HYGIENEFUNKTIONEN

Wir wenden in allen Einheiten der ULTRADENT Kompaktklasse leistungsfähige Hygienefunktionen an, um Risiken weitestgehend zu minimieren. Wählen Sie je nach Bedarf zwischen langer/kurzer Spülung vor der Behandlung oder zwischen den Patienten. Die regelmäßige Durchführung einer Intensiventkeimung ist eine weitere Option für die Keimreduktion in Ihrer Behandlungseinheit. Die Speischaule der Kompaktklasse ist übrigens thermodesinfizierbar und autoklavierbar.

INSTRUMENTENSPÜLUNG

Für das Reinigen und Desinfizieren von Bohrantrieben, Motorschläuchen, Scalerschlauch, Spritzen und weiteren Instrumenten ist das Hygienesystem mit einem eigenen Aufsatz zum Einstecken der Instrumente (vgl. Bild oben) ausgestattet. Die Maßnahme erfolgt direkt am Behandlungsplatz, ohne Zeitverlust und lange Wege.



OMPAKTKLASSE

ABNEHMBARE HANDGRIFFE

Hygienische Risiken sind bei den Kompakteinheiten von ULTRADENT minimiert. Denn einige Elemente lassen sich mühelos entfernen. Gute Beispiele dafür sind die Haltegriffe der OP-Leuchte „Solaris 2“, der Griff am Traytisch und das Mundspülbecken. Kurz abnehmen, bequem reinigen, ein paar Klicks und alles ist schnell wieder da, wo es hingehört.



SICH KÜNFTIG NOCH SCHWUNGVOLLER AN DIE ARBEIT MACHEN?

U 1280 EIN BEHANDLUNGSPLATZ, AN DEM SIE VOLLEN ELAN ENTFALTEN KÖNNEN

Die Grundkonzeption des U 1280 entspricht den drei anderen Kompaktmodellen in seiner Klasse. Und auch in essenziellen Aspekten wie Qualität und Preis-Leistungs-Angebot steht er ihnen in nichts nach. Was ihn besonders macht, ist die dynamische Anordnung der dentalmedizinischen Instrumente. Sie sind an vollständig beweglichen Schwingbügeln aufgehängt. Während der Behandlung ziehen Sie das Arztelement in Ihre optimale Zugriffsposition über die Brust des Patienten. Hier befinden sich Ihre Instrumente dann in einer ideal ausgerichteten Position und können von Ihnen ohne Kraftaufwand und ohne aufzublicken einfach gegriffen werden. Benötigen Sie das einzelne Instrument nicht mehr, schwingt es automatisch am Bügel in seine Ruheposition zurück. Ihrer Dynamik beim Arbeiten sind mit dem U 1280 keine Grenzen gesetzt. Ganz im Gegenteil: Sie werden sich beflügelt fühlen!



Für die farbliche Ausführung des **U 1280** haben wir in dieser Abbildung die Standardlackierung in Reinweiß RAL 9010 und die Polsterfarbe Cyanblau 1009T kombiniert. Die Akzentlackierung an Arztelement, Helferinnenelement und Abdeckung der Wassereinheit korrespondiert ideal mit der Polsterfarbe.



GANZE UNTERSTÜTZUNG AUCH FÜR DENTALE EINZELKÄMPFER

Mit dem U 1280 von ULTRADENT wird es kinderleicht, Eingriffe und Präparationen im Mund des Patienten ohne Assistenz vorzunehmen. Dafür platzieren Sie sich in der Überkopf-Position am Behandlungsplatz, ziehen das Arztelement mit dem rechten Arm heran und haben linker Hand das Helferinnenelement und die Absaugung parat: Alles in der passenden Entfernung, so dass Sie souverän, autark und im effizienten Alleingang behandeln können.



1



2

1 | Display seitlich am Zahnarztelement Da Sie mit dem U 1280 vorrangig aus der Überkopf-Position am Patienten arbeiten, macht es Sinn, das Display für die Anzeige der zahnärztlichen Instrumente seitlich rechts anzuordnen.

2 | Schwenkbarer Traytisch Um Ihnen bei der Arbeit am Patienten eine gut erreichbare Ablagefläche anzubieten, haben wir das heranziehbare Zahnarztelement mit einem dreh- und schwenkbaren Traytisch ausgerüstet.

U 1280

SIE WOLLEN ERGONOMIE, ERGONOMIE UND NOCHMALS ERGONOMIE? U 3000 FÜR VÖLLIG FREIE FAHRT BEIM POSITIONIEREN IHRER INSTRUMENTE

Allein sein ästhetischer Auftritt garantiert ihm 100 Punkte. Dazu kommt, dass Ihnen unser U 3000 in technischer Hinsicht Highend-Eigenschaften bietet, während seine Grundkonzeption wie bei den übrigen Modellen der ULTRADENT Kompaktklasse durch und durch pragmatisch ist: für robuste Betriebsicherheit auf höchstem Niveau und Funktionalität in Vollendung. Diese Behandlungseinheit sollten Sie für Ihre Praxis auswählen, wenn arbeitstechnische Ergonomie für Sie das Nonplusultra ist. Der U 3000 gibt Ihnen durch sein Fahrgestell die Möglichkeit, alle Instrumente passend zur Behandlungssituation auszuwählen und zu positionieren. So orientiert sich dieses Konzept eng an Ihrer praktischen Arbeit. Das Cart ist immer schnell und flexibel in der besten ergonomischen Position für den Behandler.



Zur technischen Brillanz kommt beim **U 3000** die exquisite Optik: hier in Standardlackierung Reinweiß RAL 9010 und Polsterung in Apfelgrün 5515T.

IHR ZIEL KLAR VOR AUGEN? DANN NICHTS WIE HIN!

Weil nur Sie ganz genau wissen, wie Sie Ihre zahnmedizinische Arbeit gestalten möchten, haben wir den U 3000 offen für individuelle Anforderungen gelassen. Stellen Sie sich alle Instrumente zusammen und legen Sie deren exakte Positionierung fest. Das hilft Ihnen, Behandlungen in maximaler Beweglichkeit rund um den Patienten durchzuführen: Damit Sie Ihre Leistungen ermüdungsfrei erbringen und auch bei langen und komplexen Terminen souverän im Sattel sitzen.



1




2

1 | Ablagefläche am Arztelement Zu den Vorzügen des U 3000 gehört auch die zweite Ablagefläche auf der Oberseite des Carts. Zusammen mit dem Traytisch verdoppelt sie die verfügbare Ablagefläche.

2 | Fahrbares Arztelement U 3000 EX
Diese Option des fahrbaren Arztelementes eignet sich besonders für Spezialfälle (Ein-

griffsraum): Das komplett ausgerüstete Cart mit seiner kompakten Konstruktion – unter anderem mit Druckwasserflasche und gerätemontiertem Versorgungsteil – ermöglicht einen nahezu autarken Betrieb; vorteilhaft ist auch der kabellose Funk-Fußanlasser mit eigener Halterung.

U 3000

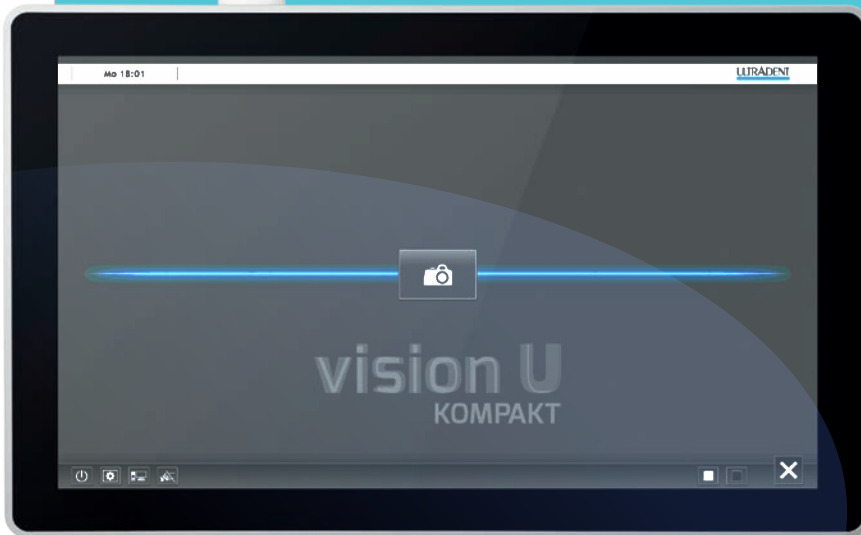

Erhältlich ab
1. Quartal 2014

WIE LÄSST SICH DIE DENTALE ARBEIT NOCH BESSER VISUALISIEREN? MIT VISION U AM START IN RICHTUNG ZUKUNFT

Die Visualisierung von Behandlungs- und Diagnoseergebnissen ist heute ein wichtiger Bestandteil der zahnärztlichen Behandlung. vision U Kompakt ist unser modernes, intraorales Kamerasystem für die zukunftsorientierte Zahnarztpraxis. Dabei steht der faszinierende vision U Kompakt Full-HD-Screen im Mittelpunkt, da er mit 55-cm-Bilddiagonale und einer hohen Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln neue visuelle Optionen bietet. Dank der hochsensiblen, entspiegelten Oberfläche können Sie mit Multi-Touch-Funktionen Bilder zeigen und bewegen: per Fingertipp und sogar mit medizinischen Handschuhen.

vision U
KOMPAKT

DER MONITOR SETZT HIGHLIGHTS – DIE INTRAORALKAMERA NEUE STANDARDS

Der vision U Kompakt Monitor wird sich schnell zum zentralen Medium für die intensive Beratung Ihrer Patienten entwickeln. Dabei leistet die vollautomatisch startende digitale Intraoralkamera mit Autofokus, Flüssigkeitslinse und bis zu 250-facher Vergrößerung wertvolle Hilfe: für gestochen scharfe Stand- und Bewegungsbilder in Premiumqualität.



Empfohlene Grundausstattung Kompaktklasse:

Zahnarztelement

- > Fahrstativ U 3000/U 6000
- > 3-Wegespritze
- > Lichtturbineneinrichtung
- > 1. Lichtmikromotor K2
- > Fußanlasser F 10, stufenlos regelbar

Wassereinheit

- > Assistenzelement Einsteiger
- > Mundspülbeckinventil
- > Traytisch U 650 lackiert, für zwei Normtrays, inkl. Traysäule

- > Assistenzelement Einsteiger

Versorgungselement

- > DVGW Trennstrecke, Permanent-Intensiventkeimung

Anbauträger

Patientenstuhl UD 2015

- > Rückenlehne, breit
- > Kopfstütze „Alle“
- > Stuhlpolster, kurz

Behandlungsleuchte

- > Behandlungsleuchte „Solaris 2“, LED

Auswahl optionaler Ausstattungselemente Kompaktklasse:

Zahnarztelement

- > 6-Wegespritze
- > 2. Lichtturbineneinrichtung für 4-Loch-Anschluss
- > 2. Lichtmikromotor K2
- > 1. Lichtmikromotor KL 7 S
- > 2. Lichtmikromotor KL 7 S
- > Zahnsteinentferner, piezokeramisch, mit LED
- > Integriertes Prophylaxe-Pulverstrahlgerät

- > Röntgenbildbetrachter (15 x 30 cm)
- > Fußanlasser F 9, kabellos, stufenlos regelbar

Wassereinheit

- > Lichtpolymerisation Mini-LED (Assistenzelement)
- > 3-Wegespritze
- > 6-Wegespritze
- > Separierautomatik mit/ohne Amalgamabscheider

EIN BLICK AUF DIE VIELFÄLTIGE AUSSTATTUNG?

DAS GANZE IST MEHR ALS DIE SUMME SEINER TEILE!

Versorgungseinheit

- > Interne Wasserversorgung mit Druckwasserflasche
- > Anschlussmöglichkeit Schnellkupplung, Wasser/Luft & Kältegerätesteckdose, 230 V

Behandlungsleuchte

- > Behandlungsleuchte „Solaris 2“, LED, 230 V, deckenmontiert mit Trafo

Patientenstuhl

- > Kopfstütze „Uni“, ausziehbar, zweifach schwenkbar
- > Kopfpolster Memoryschaum
- > Rückenlehne, schmal
- > Armlehne, rechts/links
- > Softpolster Patientenstuhl mit/ohne Massagefunktion

Traytisch

- > Zangenhalter
- > Halterung für Abfallbehälter

Multimedia

- > vision U Kompakt (Full-HD-Monitor und digitale Intraoralkamera)

Arbeitsstuhl

- > Arbeitsstuhl „Ei-UD“
- > Arbeitsstuhl „IRON“
- > Arbeitsstuhl „Pluto“

Sonderlackierung

- > Komplettlackierung
- > Akzentlackierung



**Weitere Behandlungseinheiten finden Sie unter
www.ultradent.de/de/produkte/behandlungseinheiten**

ULTRADENT

Ultradent
Dental-Medizinische Geräte
GmbH & Co. KG

Eugen-Sänger-Ring 10
85649 Brunenthal, Germany

Tel.: +49 89 42 09 92-0
Fax: +49 89 42 09 92-50
info@ultradent.de
www.ultradent.de

